


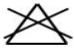
Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, denn Sie enthält wichtige Informationen darüber, was Sie vor bzw. bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten sollten.

Zusammensetzung:	<p><u>High Performance:</u> 3-Lagen-Laminat aus hydrophilem und antistatischem PES -Gewirke für die Chirurgenseite, 2 Lagen e-PTFE-Membran als Barrierschutz und PES-Gewirke für die Patientenseite</p> <p><u>Standard Performance:</u> hydrophob ausgerüstet Polyester mit Carbon Beimischung</p> <p>Alle Produkte sind gemäß der DIN EN 13795 geprüft.</p> <p>Hydrophile Mircofasergewebe lediglich als Zusatz bei vorhandener High Performance (gekennzeichnet durch rote Nähte = Standard Dieckhoff-Verarbeitung)</p>
-------------------------	---

Hersteller:	<p>Karl Dieckhoff GmbH & Co. KG In der Fleute 38 42389 Wuppertal www.dieckhoff-textil.de</p>
--------------------	---

Anwendungsgebiete im HP- und/oder SP-Bereich siehe Produktspezifikationen:	<p><u>OP-Patientenabdeckung</u> Zur sterilen Abdeckung von Patienten bei chirurgischen Eingriffen</p> <p><u>OP-Inventarabdeckung</u> Zur sterilen Abdeckung von Inventar und Geräten bei chirurgischen Eingriffen</p> <p><u>OP-Wickelmantel</u> Wechselseitiger (Patienten / Anwender) Kontaminations- und Infektionsschutz bei chirurgischen Eingriffen</p> <p><u>OP-Schutzschürzen</u> zur Gewährleistung der Sterilität im Rückenbereich bei speziell definierten Konstellationen im OP</p> <p><u>Overalls</u> Kontaminations-/Infektionsschutz des Trägers und Patienten</p> <p><u>OP-Zubehör</u> zur Gewährleistung der Sterilität bei Einsatz spezieller OP-Geräte und als Kontaminations-/Infektionsschutz des Trägers und Patienten</p> <p><u>Inkontinenzunterlagen</u> zur Gewährleistung der Dekubitusprophylaxe und der Hygiene</p>
---	--

Kennzeichnung:	<div style="background-color: red; color: black; text-align: center; padding: 20px;"><h2>ACHTUNG</h2><h3>unsteriles Medizinprodukt</h3></div>
-----------------------	---

Gegenanzeigen / Nebenwirkungen:	<ul style="list-style-type: none"> ● Die Materialien und Konfektionierungen weisen keine uns bekannten Gegenanzeigen und Nebenwirkungen auf. ● Achtung: Alkohol hebt die hydrophobe Eigenschaft der Standard Performance-Gewebe auf
Vorsichtsmaßnahmen und besondere Hinweise:	<ul style="list-style-type: none"> ● Lange Lagerzeiten von schmutziger Wäsche vermeiden ● Gesonderte Abwurfmöglichkeiten zur Gewährleistung des OP – Aufbereitungsverfahrens ● Produktspezifikationen und Faltnweisungen beachten. ● Kontakt mit alkoholischen Flüssigkeiten bei Standard Performance Vermeiden ● Hydrophile Mikrofaserewebe werden durch rote Nähte Gekennzeichnet = Standard Dieckhoff-Verarbeitung
Art und Dauer der Anwendung:	<p><u>Art:</u> Klassifizierung nach High/Standard Performance und des chirurgischen Eingriffes entsprechend der DIN EN 13795 und des MPG´s.</p> <p><u>Dauer:</u> Nach Desinfektion des OP-Bereiches bis nach Beendigung der OP mit Wundverschluss Verantwortlich ist der Operateur mit dem gesamten OP-Team</p>
Waschhinweise	<p> </p> <p>Achtung ! (keine chemische Reinigung + keine Chlorbleiche)</p> <p>Nach RKI-Liste aufgeführte Waschverfahren !</p> <p>Achtung ! Nicht übertrocknen ! Oberflächentemperatureinwirkung beim Laminat von > 85°C sind zu vermeiden!</p> <p>Siehe auch Waschanleitung der unterschiedlichen Materialien!</p>
Sterilisationshinweise	<p><u>High Performance und Standardperformance Artikel:</u> Fraktioniertes Vakuumverfahren mit gesättigtem Dampf Temperatur min. 134°C bis max. 137°C Haltezeit: min. 3 Min. / 5 Min. (siehe auch die DIN EN 285, DIN EN ISO 17665 Teil 2, KRINKO- und RKI- Empfehlung) oder ETO-Gassterilisation mit Ozon Verfahren</p>
Sonstige Hinweise:	<ul style="list-style-type: none"> ● Qualitätsprüfungen/Funktionsprüfungen vor Sterilisation durchführen ● Art der Verpackung auf das Sterilisationsverfahren und das Sterilisationsgut abstimmen ● Trocken und partikelarm lagern und Lagerbestimmung für sterile Produkte beachten ● Nur unbeschädigte Produkte/Verpackungen dürfen gelagert und verwendet werden ● Bei mechanischen Verletzungen des Laminats nur originale, vom Gewebelieferanten hergestellte Reparaturpatche, nach Herstellerangaben verwenden. ● Bei mechanischen Verletzungen der Mikrofaser Patche aus dem gleichen Gewebe nach Herstellerangaben verwenden. ● Achtung Einsatz darf nur steril erfolgen und muss einen kompletten, validierten Aufbereitungszyklus durchlaufen haben ● Tape und elastische Einsätze nach Herstelleranweisung anbringen

Der Hersteller haftet nicht für Schäden / Verletzungen, die aufgrund unsachgemäßer Handhabung, Behandlung oder Zweckentfremdung entstanden sind.

Eine Weitergabe unserer Artikel an nicht informierte / geschulte Dritte ohne Original-Dieckhoff-Gebrauchsanweisung ist nicht gestattet.